


Auxiliar Auditivo Indutivo LPS-4

Manual do utilizador

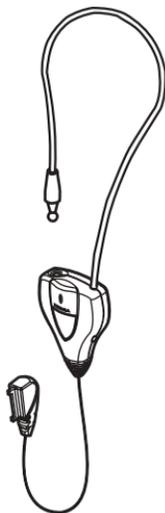

9354812
3ª Edição

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto LPS-4 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

© 2002-2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento de circulação a qualquer instante, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações, não autorizadas, efectuadas a este dispositivo podem anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9354812/3ª Edição

1. Geral

O Auxiliar Auditivo Indutivo LPS-4 para pessoas com aparelhos de audição foi desenvolvido para facilitar a utilização de um telemóvel compatível juntamente com aparelhos de audição equipados com bobine-T.

Quando utilizar o auxiliar auditivo indutivo, poderá falar directamente para o microfone localizado no interior do dispositivo. Não é necessário segurar o telemóvel junto ao ouvido, mas poderá transportá-lo utilizando uma bolsa de transporte, um clip de cinto ou outro acessório. O auxiliar auditivo não necessita de pilhas separadas.

O funcionamento do dispositivo baseia-se na tecnologia de indução utilizada em locais públicos: um sistema de auxiliar auditivo indutivo envia sons, sem recorrer a fios, que são captados pela telebobine do aparelho de audição ajustado para o modo T.

O dispositivo descrito neste manual é compatível com telefones com conector de interface Pop-Port™ (por exemplo, o telemóvel Nokia 6681 e Nokia 6682).

O auxiliar auditivo indutivo também pode ser ligado ao processador de voz de um implante coclear compatível, utilizando o conector de saída de áudio.

Leia com atenção este manual do utilizador antes de utilizar o auxiliar auditivo. Leia também o manual do utilizador do telefone, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auxiliar auditivo fora do alcance das crianças.

Para mais informações sobre auxiliares auditivos e outras soluções de acessibilidade, visite o nosso Web site em <http://www.nokiaaccessibility.com/>.


2. Utilizar o auxiliar auditivo

■ Efectuar e receber chamadas

1. Coloque o auxiliar auditivo indutivo à volta do pescoço e ligue a ficha ao respectivo conector.



2. Ligue a ficha Pop-Port à parte inferior do telefone. O telefone apresenta o seguinte símbolo: 

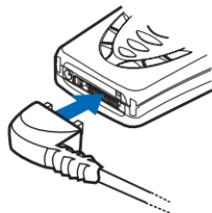

3. Mude o aparelho de audição para o modo T ou MT.

4. Para atender ou terminar uma chamada, prima o botão de atendimento do dispositivo ou utilize as teclas do telefone. É possível efectuar chamadas normalmente (consulte o manual do utilizador do telefone).



Notas

- Não é necessário ter o cabo sempre ligado ao conector Pop-Port do telefone. Pode ligá-lo apenas quando pretender efectuar ou receber chamadas.
- Quando receber uma chamada, o telefone e o auxiliar auditivo emitem um alerta se o cabo estiver ligado ao telefone e se o aparelho de audição estiver no modo T ou MT.
- Para ajustar o volume do auxiliar auditivo, utilize as teclas de volume do telefone. Para uma utilização normal, mantenha o volume baixo, de forma a ouvir a sua própria voz com clareza. Num ambiente ruidoso ou se o som recebido for fraco, aumente o volume para que o ruído de fundo se torne mais fraco e a voz do interlocutor fique mais audível.

■ Ligar o auxiliar auditivo a dispositivos externos

O auxiliar auditivo pode ser ligado a um processador de voz compatível de um implante coclear ou à entrada de áudio de um aparelho de audição. Contacte um especialista em aparelhos de audição para obter informações sobre a compatibilidade do auxiliar auditivo com o seu implante coclear ou aparelho de audição, o cabo de ligação adequado e obter instruções de utilização do cabo de ligação.

Ligue a ficha do dispositivo externo ao terminal de saída de áudio com o símbolo , no lado direito do auxiliar auditivo.



3. Dados técnicos

Saída de áudio externa:

- Conector: ficha de 3,5 mm
- Pode ser ligado à entrada de áudio de um aparelho de audição compatível ou a um processador de voz de implante coclear compatível
- Impedância: $>1\text{ k}\Omega$ a 1 kHz ($2,2\text{ k}\Omega$ a 1 kHz nominal)
- Nível normal do sinal de saída: 0,5–10 mV rms
- Símbolo: 

O auxiliar auditivo pode ser ligado a um processador de voz compatível através de um cabo adequado que tenha uma ficha de 3,5 mm estéreo ou mono. O som emitido através do auxiliar auditivo é sempre o monofónico.

Entrada de áudio externa:

- Esta funcionalidade não está disponível.
- Símbolo: 

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudarão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.